

EL VIDEOLARINGOSCOPIO

Pediátrico

MÁS VERSÁTIL

LARINGOCEL



 **Neo-Baby-2** 

www.laringocel.com

Conéctate fácilmente

1 Descarga nuestra App



2 Enciende el Laringocel



ON ☒ OFF

Las luces indicarán que tu dispositivo está encendido

3 Busca la red Wifi

Conéctate fácil sin internet desde la red wifi.



4 Ingresa



5 Acepta

Laringocel quiere buscar y conectar a dispositivos en tu red local

Esta app podrá descubrir y conectarse a dispositivos en las redes que usa.



No permitir

Permitir ☒

*Selecciona permitir para continuar.

6 Dispositivo horizontalmente

Los botones de **foto**  y **video**  deben quedar a la derecha.

Presione los botones   para alinear la imagen.

HORIZONTAL



7 Permite acceso

Laringocel quiere agregar fotos a las tuyas

Please allow to use your Photo Library.

No permitir

Ok ☒

*Selecciona Ok para continuar.

8 Ya puedes usar Laringocel




Encuentra más información en www.laringocel.com






LARINGOCEL PEDIÁTRICO

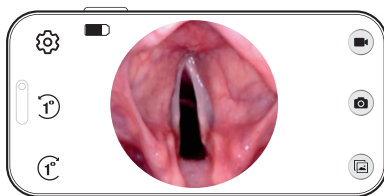

Esta guía de conexión aplica para el Laringocel Pediátrico, Neo y Baby-2.

Interfaz



-  Ajustes
-  Gira imagen derecha
-  Gira imagen izquierda
-  Indicador batería
-  Tomar video
-  Tomar foto
-  Galería

Ajustes

Selección de idioma

Spanish

English

Seleccione la resolución

640 * 480



1280 * 720



1920 * 1080



Limpieza



Primero desacople el componente plástico del componente electrónico.

- Lave con agua y jabón con clorhexidina por 2 min.
- Secar con toallas de papel.
- Sumerja en jabón enzimático durante 20 minutos.
- Lave con abundante agua y retire el jabón enzimático.
- Secar con toallas de papel.

Garantía Laringocel



- **Garantía de 6 meses** por defectos de fabricación.
- **No cubre daños** de la batería por contacto con humedad o químicos abrasivos.
- **No cubre daños** del componente electrónico por mal trato (golpe, humedad, mal uso, sobrecargas eléctricas, exposición a altas temperaturas, etc.)

 Laringocel®

- Lave únicamente desde la cámara hasta el cable con agua, jabón y Clorhexidina por 2 min. no mojar la batería. Secar con toalla de papel.
- Impregne la cámara y cable en jabón enzimático y deje secar en una superficie seca por 20 min. no mojar la batería.
- Sin mojar la batería, lave con abundante agua para retirar el jabón enzimático.

Plástico

Electrónico



Práctico

- Portátil, compacto y ligero
- No requiere internet
- Batería recargable
- Curvatura para vía aérea difícil

Inteligente

- Alcance de 10 m entre dispositivos
- Guarda y comparte fotos y videos
- Conexión wifi a 1 o 2 dispositivos



Especificaciones técnicas

Electrónico

- Resolución 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480.
- Ángulo de visión 45°, lente antiempañado y distancia focal de 3 cm a 10 cm.
- Cámara resistente al agua IP67 (unicamente el lente, no la batería).
- Cámara con 6 luces led y 5 mm de diametro.
- Batería interna de 450 mAh (autonomía de 90 minutos). Voltaje de trabajo DC 5V/2A

Plástico

- Fabricado en policarbonato ultraresistente.
- Libre de olor, sabor, no libera residuos, libre de BPA.
- Reutilizable, resistente a jabones quirúrgicos y enzimáticos usados para esterilizar.
- Tamaño unico para intubación efectiva en rango de edad desde los 8 años.



Conoce más aquí

FABRICADO Y
DISTRIBUIDO POR

Tr Tronical

Contáctanos

- ✉ laringocel@gmail.com
- ✉ tronicalsas@gmail.com
- ☎ +57 315 471 4920

Neiva, Huila | 2023

Laringocel®

| REGISTRO INVIMA

RES: No. 2024036011
de 1 de agosto de 2024.



**PRODUCTO
PATENTADO**